

小原式電気オーブン モデルA



概要


本オーブンは、義肢装具製作者がその作業性を向上させるために使用できるように、開発にあたっては多数の義肢製作所諸氏のご意見ご要望を反映させて完成に至ったものです。従って、従来の乾燥機に比べて機能、性能の充実はもとよりデザインも一新しており、最高級機種としての風格ももたらしめております。

最近の多種多彩なプラスチックシート of 全てに適応できるよう、連続運転で最高250℃を可能にしておき、真空成型加工機と併用することにより軟性ポリエチレンからサブオーソレンに至るまで義肢装具で必要とする成型加工に全面的に対応しております。

仕様

電源 : 三相200V
容量 : 9.5kw
温度設定: 0℃~250℃任意設定
外寸法 : 開口 1600mm
奥行き1305mm
高さ 1680mm
内寸法 : 開口 1300mm
奥行き850mm
高さ 760mm
総重量 : 約350kg
タイマー : 60分任意設定
温度制御: サーモスタット自動制御



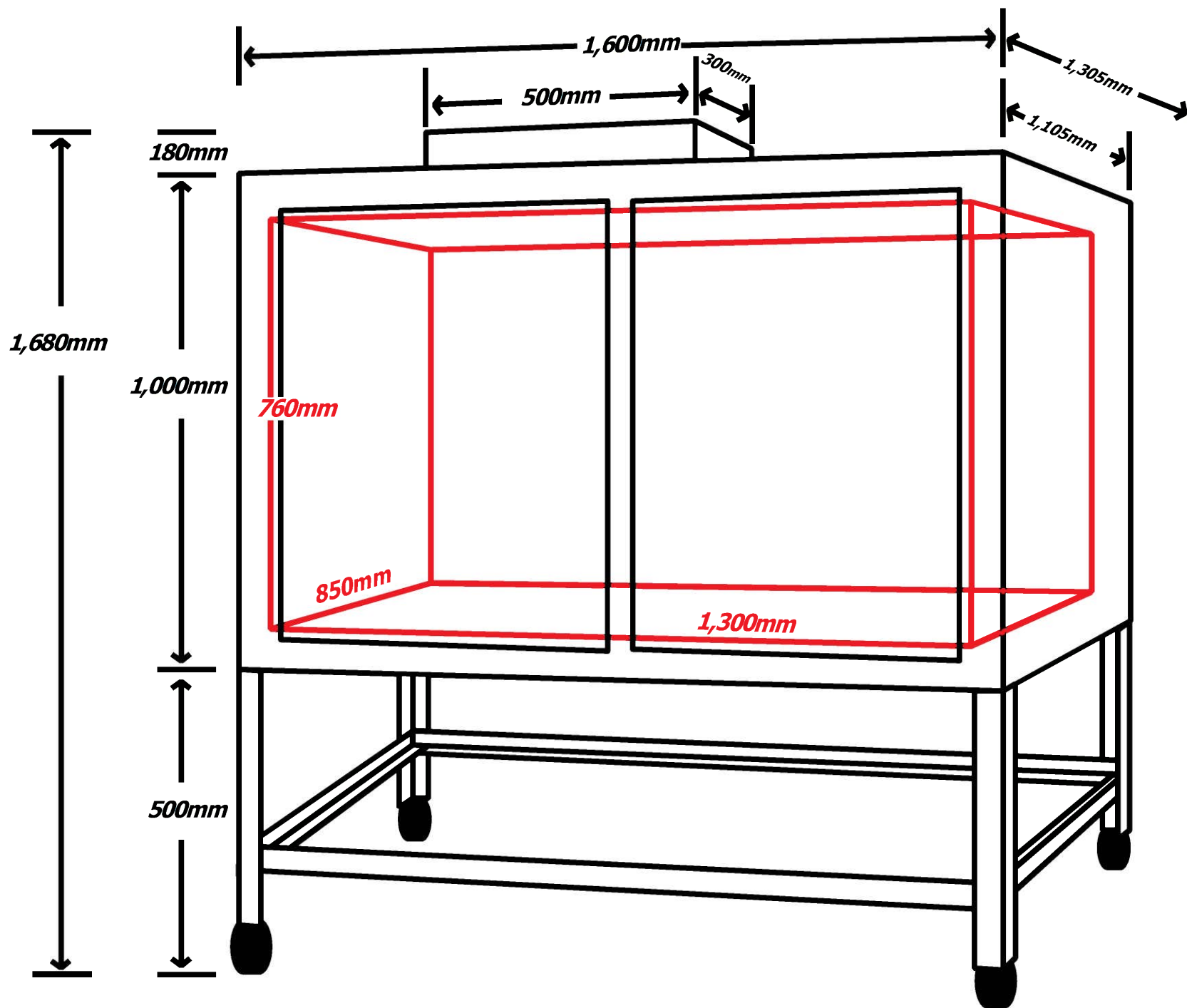

オープン寸法

小原製オーブンにおける設置条件及び使用上の注意事項

オーブンは義肢用プラスチック用に製造されたものです。それ以外の用途には絶対に使用しないでください。また、ご購入の際は必ず設置場所の状況、使用方法に十分にご注意 ください。

- ① それぞれのオーブンに合った電源を単独でお使いください。お使いいただくオーブンに必要な電力の供給量をご確認いただき、工事が必要な場合は電力会社に必ずお問い合わせください。（供給されていない場合、別途工事がが必要です。）
- ② 異常がある、不審に思うなどの事故が発生した場合、直ちに電源を切って使用を中止し、弊社にお問い合わせ下さい。ご自分で分解・修理作業・改造など絶対に行わないでください。
- ③ 雨、風が当たらず、換気の良い場所に設置してください。
- ④ オーブンは壁や家具から 50 c m以上離してください。
- ⑤ 床が不燃性でない場合は、市販のコンクリートブロックや耐火ボードの上に設置してください。
- ⑥ 熱に弱いものを近づけないでください。
- ⑦ お子様の手の届くところで絶対に使用しないようにご注意ください。
- ⑧ 加熱中は、取手部および操作部以外の箇所に手を触れないでください。
- ⑨ 1 時間以上使用しない場合は、必ず本体の電源を切りブレーカーを落としてください。
- ⑩ 傷んだ電源コードや電源プラグのままでは使用しないでください。
- ⑪ 本体の電源を切る前にブレーカーを落とさないでください。
- ⑫ お手入れ、点検の際は必ずブレーカーを落としてから行ってください。
- ⑬ 所有者以外の方がご使用される場合の 安全管理のもとでご使用いただくようお願いいたします。